

Polishset (Art.-Nr. 910.00.096)

bestehend aus:

- 1 Stk. diaPOLISH, Diamant-Polierpaste für die Handstückpolitur (Art.-Nr. 910.00.095)
- 1 Stk. Miniaturschwabbel (Art.-Nr. 910.00.097)
- 4 Stk. Miniaturbürsten (Art.-Nr. 910.00.098)




Verarbeitungsanleitung

Indikationen

diaPOLISH ist eine Vor- und Hochglanzpolitur mit dem Handstück für:

- CAD/CAM-Zirkonoxid-Keramik, Stege, Teleskope, Geschiebe, Umlaufrasten und sonstige Hilfsteile
- Keramikverblendungen **vor** und **nach** dem Glanzbrand
- NE-Legierungen, harte Edelmetalllegierungen

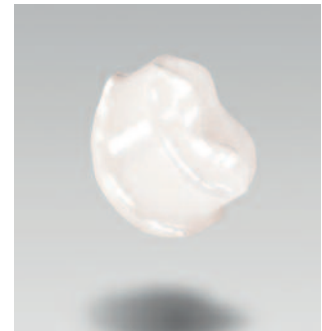

Verarbeitungsvorschrift

- 1 Polierbürsten und/oder Schwabbel vor dem Benutzen bei mittlerer Umdrehungszahl an einem Holz oder Tischplatte abziehen (ohne Paste).
- 2 Mit Miniaturbürsten (Art.-Nr. 910.00.098) mit Paste (wenig, da sehr ergiebig) polieren.
- 3 Hochglanz:
Mit Miniaturschwabbel (Art.-Nr. 910.00.097) – **ohne Paste!**
Geschwindigkeit für Handstück: 5.000–25.000 U/min
- 4 Reinigung:
Ultraschallbad ca. 50°C warmes Wasser mit Netzmittel oder Abdampfen.

Lagerung

Nicht über 25°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behältnisse nach Gebrauch stets verschließen und für Kinder unzugänglich ausbewahren.

Wichtig

⚠ *Nur für den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal*

Die vorstehend gemachten Angaben entsprechen den in unserem Labor gemachten Erfahrungen und können aufgrund wechselnder Verhältnisse davon abweichen.



Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental
Einsteinstraße 4
71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon 07152/5009-60
Telefax 07152/5009-80
www.galvanoforming.de

13. August 2013