

# Gramm GES- und GHP-System

## Hinweis zum Recycling und Entsorgung

### Flaschen aufbewahren!



#### Kennzeichnung

Bekleben Sie die zum Recycling/zur Entsorgung vorgesehenen Behältnisse mit dem beigefügten orangefarbenen Aufkleber „zum Recyclen“. Nur so gekennzeichnete Behältnisse können entgegen genommen werden.

- ⚠ *Verwenden Sie für die verbrauchten Flüssigkeiten ausschließlich die Flaschen, in denen die Flüssigkeiten angeliefert wurden!*
- ⚠ *Bitte Flaschen nicht ausspülen oder für andere Flüssigkeiten verwenden!*

#### Nur sortenreine Flüssigkeiten zum Recycling/Entsorgung

ECOLYT-Goldbad und die Vergoldungsflüssigkeiten dürfen nicht vermischt werden. Verwenden Sie hierfür getrennte Behältnisse.

Auch dürfen zu recycelndes ECOLYT-Goldbad und die zu entsorgenden Vergoldungsflüssigkeiten nicht mit anderen Flüssigkeiten vermischt werden.

- ⚠ *Kontaminiertes Goldbad oder Vergoldungsflüssigkeiten können nicht recycelt/entsorgt werden und werden unfrei an den Absender zurück geschickt.*

#### Verpackung

Verrauben Sie die Behältnisse fest und auslaufsicher. Verwenden Sie für den Versand eine transportsichere Verpackung.

#### Versand

Bitte senden Sie die Flüssigkeiten zum Recyclen/Entsorgen an folgende Adresse:

Gramm Technik GmbH  
Geschäftsbereich Dental  
z.Hd. Frau Wengerodt  
Am Vogelherd 24  
98693 Ilmenau



Gramm Technik GmbH  
Geschäftsbereich Dental  
Einsteinstraße 4  
71254 Ditzingen-Heimerdingen  
Telefon 07152/5009-60  
Telefax 07152/5009-80  
www.galvanoforming.de