

Reinigungsanleitung für vergoldete Galvanoköpfe

Die Kontakte des Galvanokopfes, der optiCLIC Magnetstäbe und der Anoden sind vergoldet. Vor jedem Galvanoprozess müssen die Kontaktstellen gereinigt werden.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen ausschließlich Aceton und ein Wattestäbchen.

Auf gar keinen Fall dürfen andere Reinigungsmittel verwendet werden, sonst könnten die Kontakte beschädigt werden.

Haben Sie noch Fragen, rufen Sie uns an unter 07152-500960.

Weiterhin viel Erfolg mit der Galvanotechnik!



Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental
Einsteinstraße 4
71254 Ditzingen-Heimerdingen