

CleanFix (Art.-Nr. 910.00.088)

Anwendungsanweisung



Nach dem Fräsen und Polieren und vor dem Galvanisieren ist eine sorgfältige Grundreinigung der Teile notwendig, d.h. sie müssen gründlich abgedampft werden. Danach bleiben noch Rückstände von Politur oder des Fräsöls – oder auch Fingerabdrücke – diese müssen auch noch entfernt werden.

Mit CleanFix hat Gramm Technik ein Reinigungskonzentrat entwickelt, das speziell auf diese Anforderungen abgestimmt wurde: Teleskopkronen, Stege, alle Arbeiten aus Keramik und Zirkon oder auch Metallgussgerüste und Prothesen lassen sich mit dem geruchsfreien Konzentrat schnell und problemlos reinigen und Rückstände entfernen.

Das CleanFix-Konzentrat wird im Verhältnis 2:3 mit Wasser angemischt. Um das zu erleichtern, ist ein speziell beschriftetes Becherglas lieferbar (Art.-Nr. 000.00.188). Bestandteil des Glases ist ein Deckel, der es in sich hat: Die Unterseite des Deckels ist mit einer Edelstahlplatte versehen. An diese können die schon für das Galvanisieren vorbereiteten optiCLIC-Kontaktierungsstäbe angeklickt werden. Nun einfach den Deckel auf das Glas und der Reinigungsvorgang (ca. 10 Minuten) kann beginnen. Sie können das bestückte Glas auch ins Ultraschallgerät stellen, dann wird die Reinigung beschleunigt und dauert nur 5 Minuten.

Den Deckel abnehmen und die Teile gut unter fließendem kaltem Wasser abspülen. Die Teile für eine Minute in das mit frischem Wasser gefüllte Spülbad 1 des AU-Sets hängen. Anschließend herausnehmen und mit Druckluft abblasen. Das Spülbad 1 des AU-Sets unmittelbar danach wechseln.

Nun können die Arbeiten ganz normal weiter verarbeitet werden.

Modellgussgerüste, die zum Beispiel für eine Vergoldung oder eine Friktionserneuerung versehen sind, können ebenfalls mit CleanFix gereinigt werden. Hierfür die Prothese zur Reinigung in das Glas legen und ins Ultraschallgerät geben.

Das CleanFix Konzentrat ist mehrfach verwendbar bis in der Reinigungsflüssigkeit Schmutzpartikel sichtbar werden, dann sollte das CleanFix ausgetauscht werden.



Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental
Einsteinstraße 4
71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon 07152/5009-60
Telefax 07152/5009-80
www.galvanoforming.de