


Hinweis

Vor jeder Benutzung der optiCLIC-Magnetstäbe von GAMMAT® optimo2 und GAMMAT® free mit UpGrade-Set muss unbedingt das dünne Ende des Stabes sorgfältig mit Drahtbürste, Sandpapier oder Gummipolierer gereinigt werden, um die (nicht sichtbare) Oxidschicht zu entfernen, die sich auf dem Edelstahl bildet.

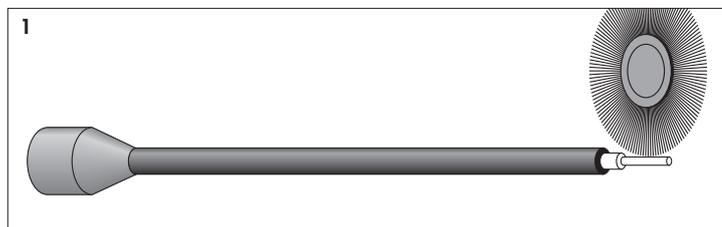

⚠ Achten sie darauf, dass die Kunststoffummantelung nicht beschädigt wird.



**Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental**

Einsteinstraße 4
71254 Ditzingen-Heimerdingen

Telefon 07152 500960
Telefax 07152 500980
E-Mail gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Stand: März 2008